

# Hinweise zum Versand von Patientenuntersuchungen und Konstanzprüfungsaufnahmen an die Ärztliche Stelle im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Teleradiologieverbund (TRV)


Stand: Januar 2018

## Voraussetzung:

Der Übersendende muss eine **QA-Berechtigung** zur Bearbeitung von Patientendaten haben und sich mit entsprechendem **Password anmelden**.


Die QA-Berechtigung wird von VISUS eingerichtet!


## Vorgang:

1. Bitte melden Sie sich mit einem Benutzer, der **autorisiert** ist, Patientendaten vor dem Verschicken zu ändern, wie gewohnt am **JiveX Mobile-Client** an.
2. Zunächst müssen Sie eine Studie selektieren und auf den **Mail-Button**  klicken.  
Es erscheint der DICOM Mail-Dialog.

Danach auf den „Bearbeiten-Button“ klicken.

sende nur Key Images  
 sende Befundtext mit

sende Patientendaten anonymisiert  
 sende Kurznotiz mit

	Typ	Patientenname	Geburtsdatum	Studienbeschreibung	Studiendatum	Studiengröße (Bytes)
<input type="checkbox"/>	Study	Mustermann Max	2000-01-01	Thorax*01_Lungenembolie (Erwachsener)	2016-10-07	26.1 MB


  


sende nur Key Images  
 sende Befundtext mit

sende Patientendaten anonymisiert  
 sende Kurznotiz mit


	Typ	Patientenname	Geburtsdatum	Studienbeschreibung	Studiendatum	Studiengröße (Bytes)
<input checked="" type="checkbox"/>	Study	Mustermann Max	2000-01-01	Thorax*01_Lungenembolie (Erwachsener)	2016-10-07	26.1 MB

Jetzt öffnet sich der **Bearbeitungsmodus**.

3. Nun ist bei der Patienten-ID. als **neuer Wert** die von der Ärztlichen Stelle angegebene **ÄK-Geräte-ID.** einzusetzen.  siehe Hinweis Kasten

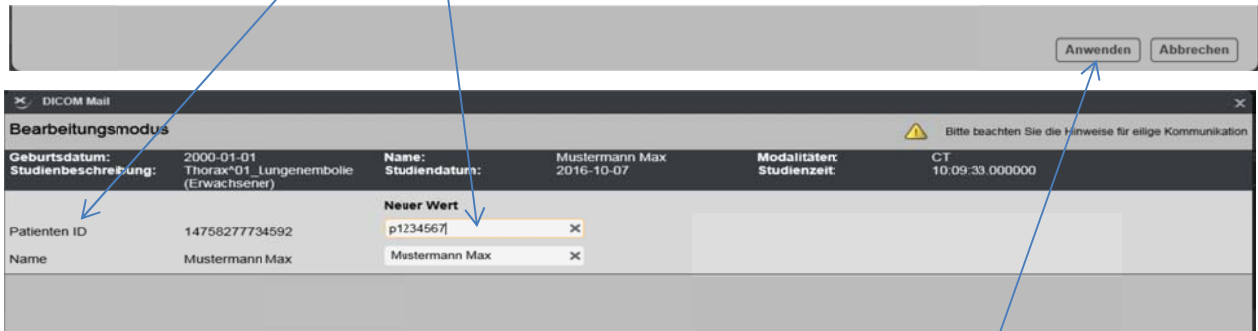

The screenshot shows a software interface for DICOM Mail. At the top right, there are buttons for 'Anwenden' and 'Abbrechen'. Below this is a header bar with 'DICOM Mail' and a warning icon with the text 'Bitte beachten Sie die Hinweise für eilige Kommunikation'. The main area contains patient information: 'Geburtsdatum: 2000-01-01', 'Studienbeschreibung: Thorax\*01\_Lungenembolie (Erwachsener)', 'Name: Mustermann Max', 'Studiendatum: 2016-10-07', 'Modalitäten: CT', and 'Studienzeit: 10:09:33.000000'. Below this is a table with two columns: 'Patienten ID' and 'Neuer Wert'. The 'Patienten ID' field contains '14758277734592'. The 'Neuer Wert' field contains 'p1234567' and has a small 'x' icon to its right. Below the 'Neuer Wert' field is another field for 'Name' containing 'Mustermann Max' with an 'x' icon.

 Hierbei ist zu beachten, dass immer ein **p** (für Patientenaufnahmen) oder ein **k** (für Konstanzprüfungsaufnahmen) vor der entsprechenden ÄK-Geräte-ID. zu setzen ist.  
Es darf **KEIN LEERZEICHEN** zwischen dem Buchstaben und der ÄK-Geräte-ID. gesetzt werden!  
**Beispiel:**  
Für die Patientenaufnahme **p12345** oder  
für die Konstanzprüfungsaufnahme **k12345**

Dadurch wird die korrekte Zuordnung zwischen Gerät und Patienten- und Konstanzprüfungsbildern hergestellt. Ohne diese Zuordnung können die Bilder bei der Ärztlichen Stelle weder aufgerufen noch wiedergefunden werden.  
Ansonsten muss **eine CD** geschickt werden.

Allgemeiner Hinweis: Hierbei ändert sich nicht die hausinterne Patienten-ID-Nr.

4. Wenn dies erfolgt ist, auf den Button „Anwenden“ drücken und schließlich die Studie mit den veränderten Daten an die Ärztliche Stelle senden.
5. Eine E-Mail an die Ärztliche Stelle schicken, dass Aufnahmen vom Gerät ID.: xxxx am tt.mm.jjjj (Datum) geschickt werden bzw. wurden.

Bei Übertragungsproblemen sollte eine Kontaktaufnahme mit der Firma Visus erfolgen.  
(Tel.: 0234 – 93693 200).

**Achtung:**  
**Mamma-Tomographien können zurzeit mit diesem Verfahren nicht verschickt werden (zu hohe Datenmenge).**